


מדריך משתמשים

Minuteful for Wound

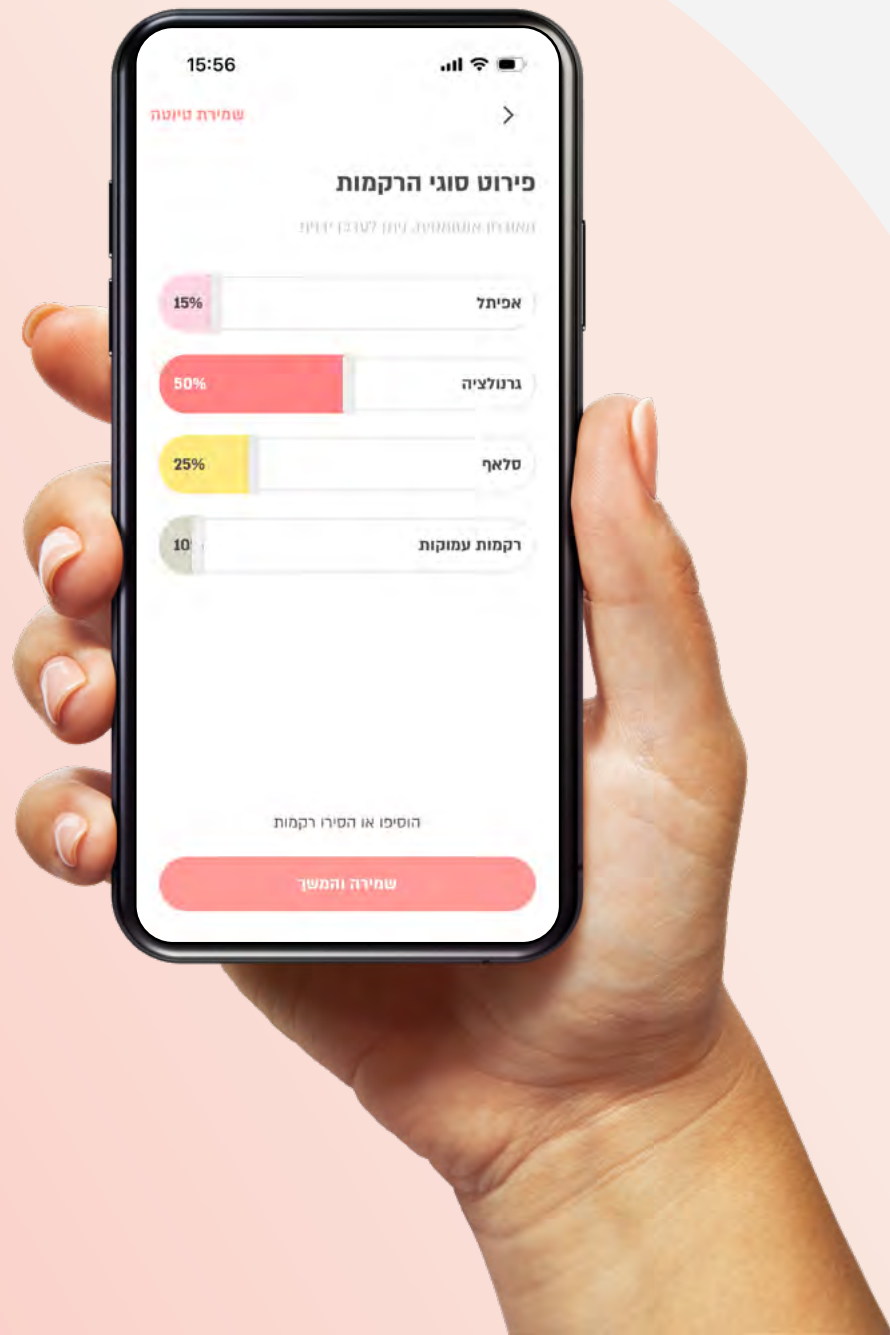

אודות **1**
Minuteful for Wound

יעוד המוצר

Minuteful for Wound מיועד לשימוש על ידי אנשי צוות רפואי מקצועי בלבד, ומשמש ככלי תומך בתהליך התיעוד, הניטור, המדידה של והטיפול בפצעים כרוניים.

תיאור כללי

המוצר מורכב ממדבקות כיוול ייעודיות (המסופקות בערכת Minuteful for Wound), יישומון (אפליקציית Minuteful for Wound) למכשירים ניידים (טלפונים חכמים וטאבלטים) ופורטל מבוסס דפדפן אינטרנט (פורטל Minuteful for Wound) אשר ביחד הופכים את המכשיר הנייד לכלי מדידה התומך בטיפול בפצעים כרוניים. המשתמשים יכולים להיעזר ביישומון בתהליך איסוף המידע הקליני הנוגע למטופלים ולפצעים, לאסוף תיעוד מצולם של הפצעים ולמדוד את הפצעים באופן חצי-אוטומטי בעזרת המצלמה של המכשיר הנייד. לאחר איסוף המידע על הפצעים, המידע זמין עבור המשתמשים בדפדפן Minuteful for Wound בפורטל ו/או בתיק הרפואי הממוחשב.

אזהרות

- יש להשתמש רק במדבקות כיול שהן חלק מערכת Minuteful for Wound
- אין להשתמש במדבקות כיול מלוכלכות ו/או פגומות.
- אין להשתמש בערכה שפג תוקפה או בערכה עם סימני בלאי או פגיעה פיזית.
- יש לשמור את מדבקות הכיול באריזתן המקורית עד לשימוש.
- אין להדביק את מדבקת הכיול על עור מגורה או פגום.
- מדבקות הכיול של Minuteful for Wound או תגובה אלרגית.
- יש לוודא כי המכשיר הנייד מחובר לרשת האינטרנט לצורך הגדרה ראשונית, לפני תחילת השימוש באפליקציה.
- יש לוודא כי רמת הסוללה במכשיר הנייד הינה לפחות 20% . במידה ורמת הסוללה מתחת ל 20% , הזנת פרטי הפצע עלולה להיכשל.
- יש לוודא כי מצלמת המכשיר הנייד עובדת ותקינה וכי העדשה של המצלמה נקייה לפני תחילת תיעוד הפצע (בידקו האם ניתן לצלם תמונה ביישומון המצלמה במערכת ההפעלה של המכשיר).
- לפני סריקת הפצע, יש לוודא כי החדר מואר היטב.
- לפני סגירת האפליקציה יש לוודא כי תהליך העלאת הנתונים הושלם.
- לפני סגירת האפליקציה אנא התנתקו מחשבונכם.
- אנא וודאו כי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה נגיש אך ורק לצוות המאושר לשימוש.

התווית נגד

אין להשתמש במדבקות הכיול במידה וידועה רגישות יתר של המטופל לדבק רפואי.

מדבקות כיול - שימוש ואחסון

- יש לשמור את אריזת מדבקות הכיול סגורה באריזה המקורית כל עוד אינה בשימוש.
- יש לאחסן את האריזה בטמפרטורה של 10-30 מעלות צלזיוס.
- אין לחשוף את המדבקות לאור שמש ישיר.
- יש לשמור את המדבקות בסביבה יבשה.
- יש להוציא את מדבקה מאריזת המדבקות רק בסמוך לשימוש בה.
- יש להשתמש בכפפות חד פעמיות ונקיות בעת מיקום מדבקת הכיול על עור המטופל/ת.
- יש למקם את מדבקת הכיול במרחק של כ-2 ס"מ מקצות הפצע על עור שאינו פגום.
- על מנת להסיר את מדבקת הכיול, יש לשחרר את קצה המדבקה ולהסירה באיטיות הרחק מהפצע.
- לאחר השימוש, יש להשליך את המדבקה בהתאם להנחיות הארגון.

סימן	משמעות	תיאור
	פצע סטגנטי	מופיע כאשר פצע לא קטן בשטחו ב- 10% לפחות לאורך 3 שבועות
	המשך ביקור	המשך ביקור
 Healed	פצע שהחלים	פצע שהחלים
	פצע אשר שטחו גדל	פצע אשר שטחו גדל
	פצע אשר שטחו קטן	פצע אשר שטחו קטן

מקרא סימנים באפליקציה ובפורטל





איך מתחילים **2**

2.1 יצירת חשבון

לאחר ההרשמה, תקבלו מייל מ-users@healthy.io עם קישור ליצירת סיסמה. הקישור בתוקף למשך חמישה ימים, על כן השתדלו להשלים את ההתחברות בהקדם.

במידה ופג תוקפו של הקישור, ניתן לפנות ל-woundsupportil@healthy.io ונשלח לכם קישור חדש.

מרגע הגדרת הסיסמה, תוכלו להתחבר לאפליקציה ולפורטל באמצעות המייל המקצועי והסיסמה בה בחרתם.

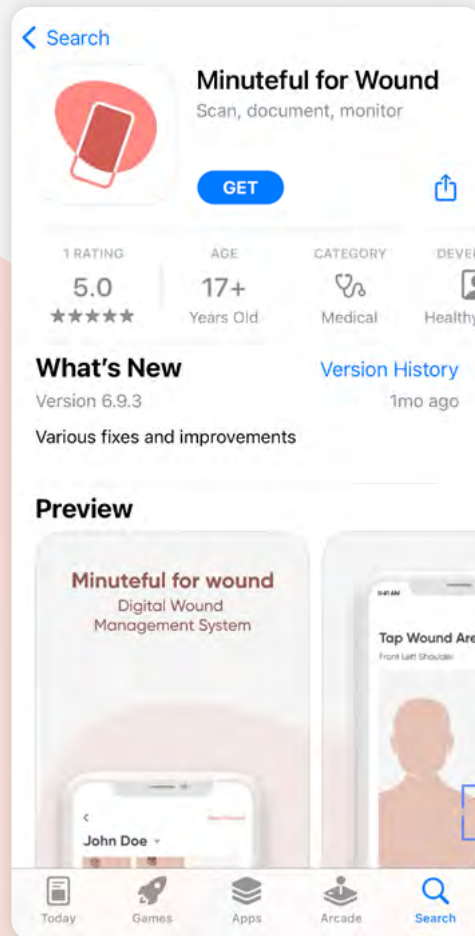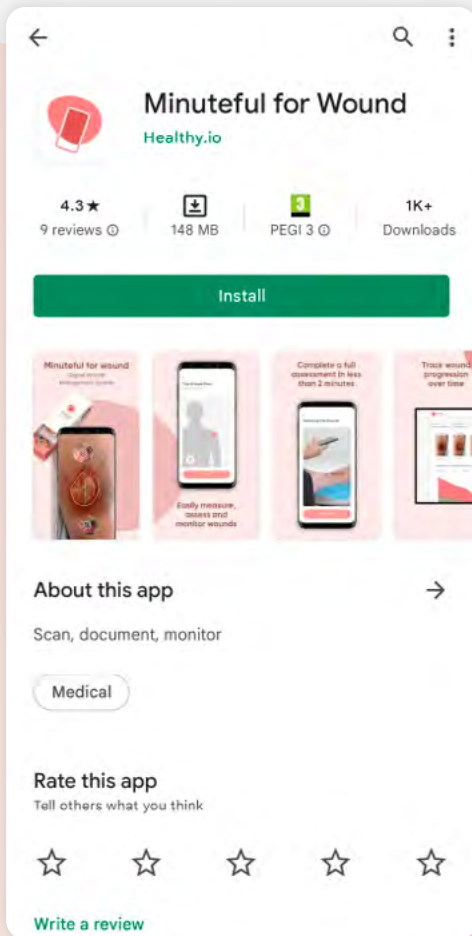

2.2 הורדת האפליקציה

אם האפליקציה עוד לא מותקנת על מכשירכם, ניתן להוריד אותה מחנות האפליקציות של המכשיר הנייד שלכם (Apple store/Android store וכדומה)


חפשו: Minuteful for Wound ←

לחצו על "התקן" ←

אם לא הצלחתם לאתר את האפליקציה בחיפוש, פנו אל מחלקת המחשוב במוסדכם לקבלת סיוע בהשגת גישה לאפליקציה דרך מכשירכם. ←



3 האפליקציה (יישומון)

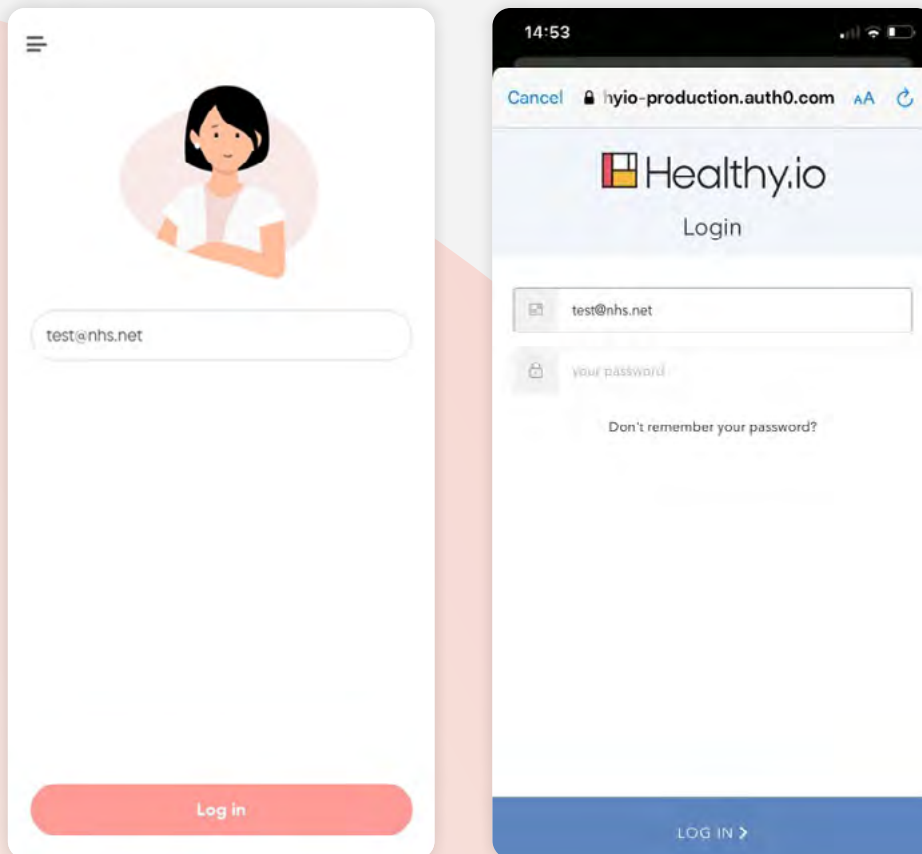


האפליקציה היא כלי העבודה שלכם, בה תשתמשו לצורך סריקה והערכה של פצע בכל ביקור.

3.1 התחברות

שם המשתמש הינו כתובת המייל שדרכה יצרתם משתמש.

בפתיחת האפליקציה, תתבקשו להקליד את כתובת המייל. במסך הבא, תתבקשו להכניס את הסיסמה.

במידה ושכחתם את הסיסמה או חווים קושי בהתחברות, לחצו "אינני זוכר את הסיסמה" והקלידו את כתובת המייל שלכם. אנו נשלח לכם קישור לאיפוס הסיסמה. אם אינכם מצליחים להתחבר משום שיעוד לא יצרתם משתמש, אנא פנו ל: woundsupportil@healthy.io.

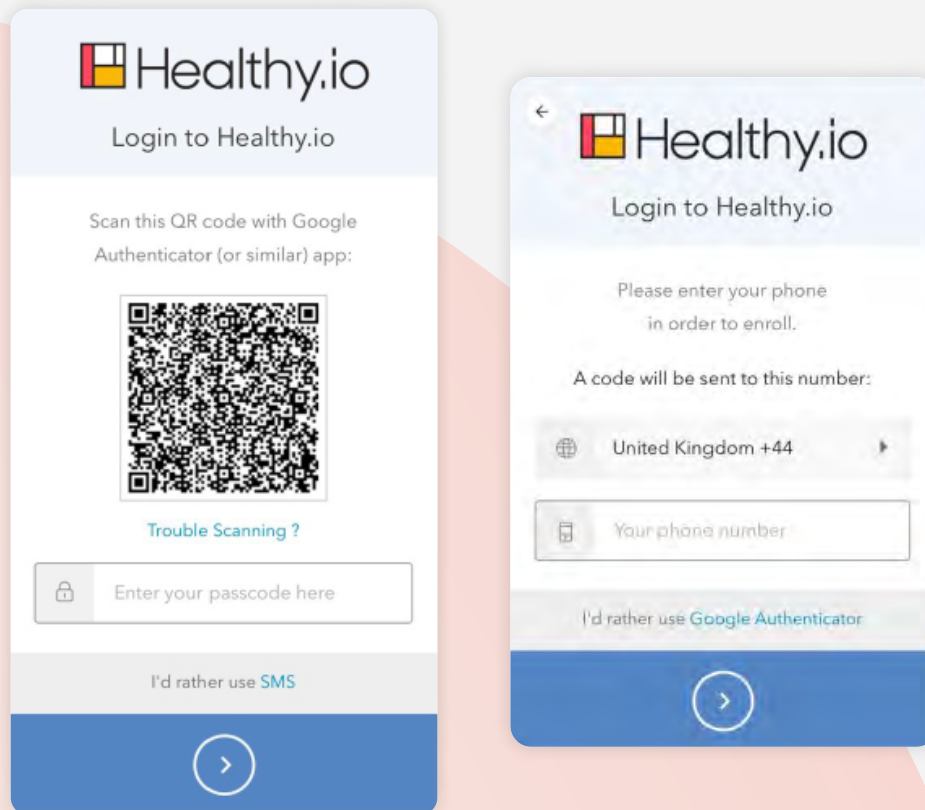


3.2 אימות דו-שלבי

למשתמשים מסוימים בעלי גישה מתקדמת יוסדר אימות דו-שלבי למערכת (Two-factor authentication - 2FA).

עם כניסתכם למערכת, לחיצה על "זכור אותי" תאפשר להשלים אימות דו-שלבי (2FA) כל 30 יום. אחרת, יהיה עליכם לבצע אימות דו-שלבי בכל כניסה לאפליקציה. ←

הדרך הפשוטה ביותר לבצע אימות דו-שלבי היא באמצעות הודעת מסרון SMS. לחצו על "מעדיף ב-SMS". ←

הקלידו את מספר הטלפון כולל קידומת (ישראל: +972). מספר הטלפון לא בהכרח חייב להיות תואם למכשיר ממנו אתם משתמשים באפליקציה, לדוגמה, אם היא מותקנת על מכשיר שיתופי או על אייפד. מספר הטלפון משמש אך ורק לקבלת SMS האימות, והמספר אינו נשמר במערכת. ←

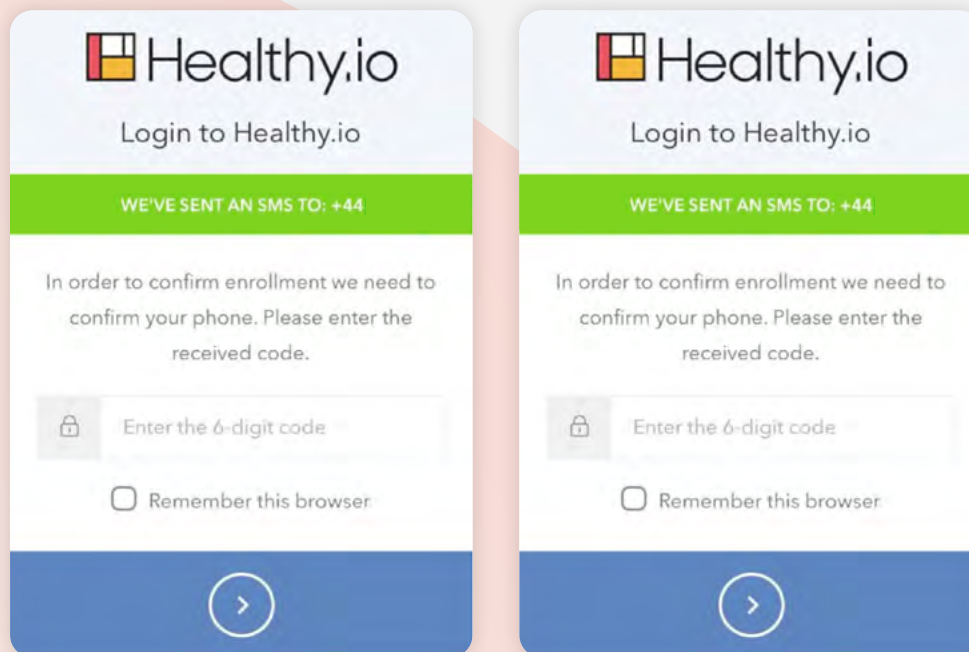


3.2 אימות דו-שלבי

יש להקליד את הקוד שקיבלתם בהודעת מסרון ה-SMS. ←

לחיצה על "זכור אותי" תאפשר לחזור אימות הדו-שלבי בפעם הבאה רק בעוד 30 יום. ←


אחרת, יהיה עליכם לבצע אימות דו-שלבי בכל כניסה לאפליקציה. ←

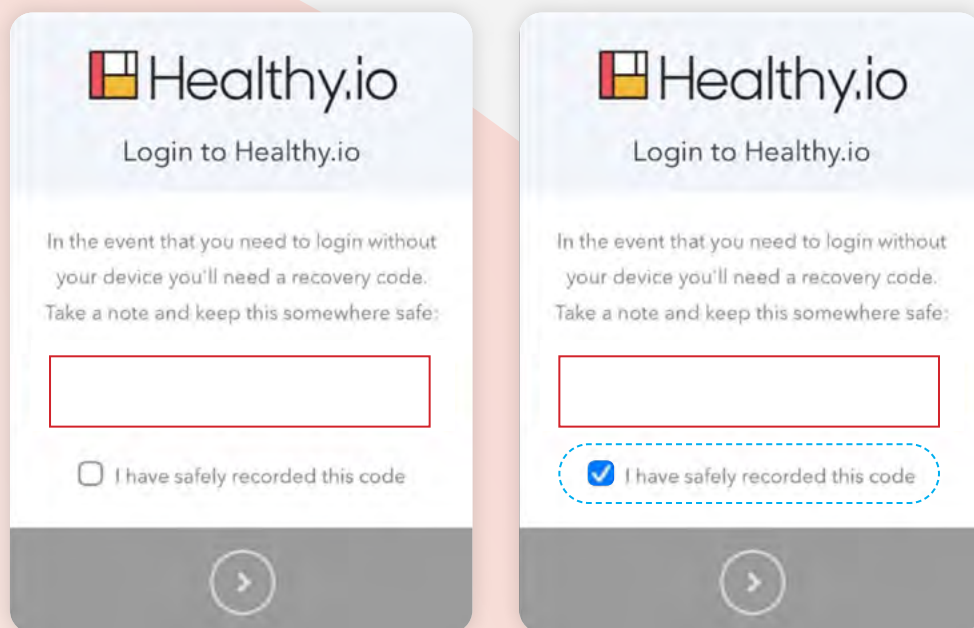

3.2 אימות דו-שלבי

← כחלק מתהליך ה-2FA, יש ליצור להמציא קוד שחזור למקרה של כניסה דרך מכשיר אחר. יש לשמור את קוד השחזור במקום בטוח.

← לאחר מכן, לחצו על "שמרתי את קוד השחזור".

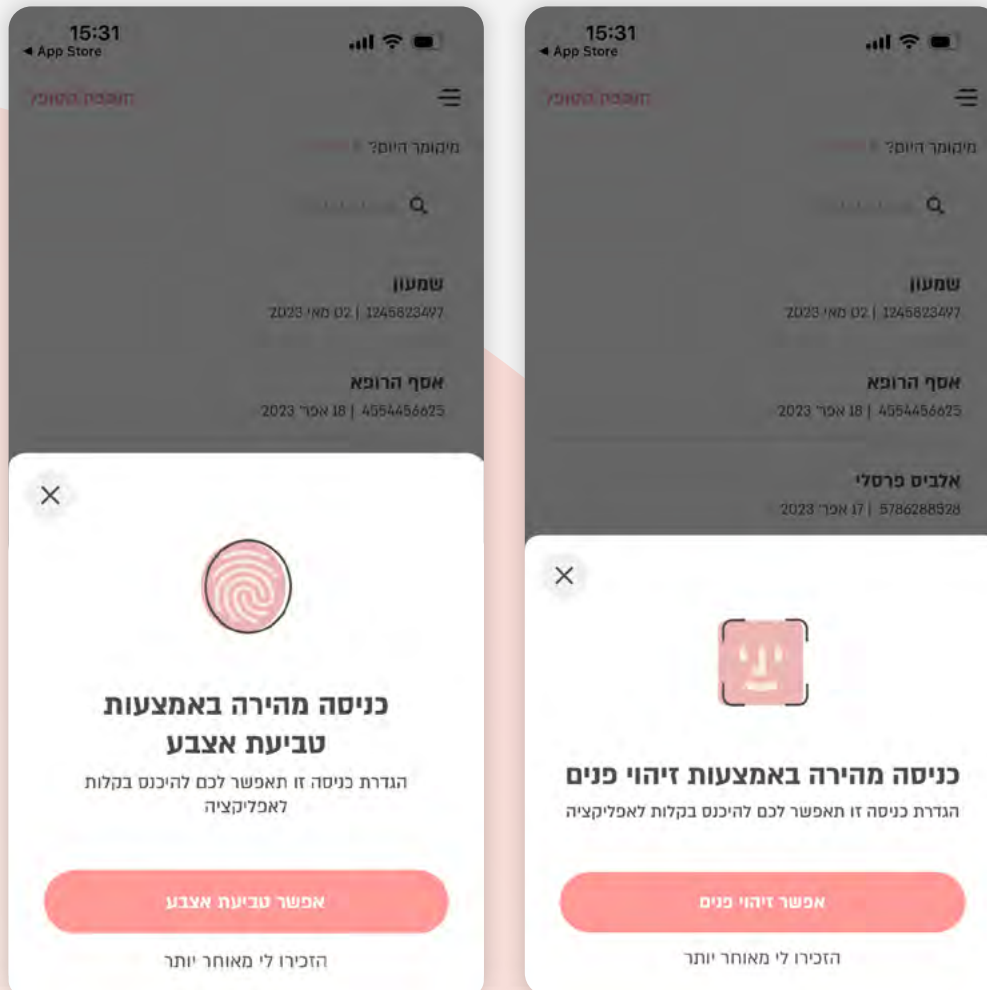

3.3 כניסה ביומטרית

תחת ההגדרות הביומטריות במערכת ההפעלה של מכשיר הנייד, הגדירו זיהוי פנים וזיהוי טביעת אצבע.

אפשרו כניסה ביומטרית לאפליקציה. בצורה זו, בהתחברות הבאה תוכלו להשתמש בזיהוי פנים או טביעת אצבע השמורה במכשיר כדי להתחבר בקלות לאפליקציה וכן להתעדכן במצב לא מקוון.

לתמיכה נוספת

לתמיכה נוספת או לדיווח על אירוע חריג הקשור לשימוש במוצר,
אנא צרו קשר עם היצרן במייל: woundsupportil@healthy.io

